



BACTIDYN® ASPIRATION CHIRURGICALE

NETTOYANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ

BACTIDYN ASPIRATION CHIRURGICALE est un nettoyant désinfectant concentré des circuits d'aspiration chirurgicale, pompes à salives, dispositifs médicaux des hopitaux et des cabinets de chirurgie dentaire en particulier dispositifs médicaux non invasifs.

ACTIVITES

BACTERICIDE : conforme normes européennes EN 1040, EN 1276,

EN 13 727. **FONGICIDE** : conforme norme européenne EN 1275

ACTIVITE SUR LES VIRUS : selon la méthodologie de la norme AFNOR T 72 180 Poliovirus, Adenovirus, Herpes virus. Inactivation du virus VIH en 5 minutes (M. A. WAINBERG, 1990) Inactivation du virus VHB en 5 minutes (IPL 062794)

COMPOSITION

PEROXYDES - AMMONIUM QUATERNAIRES SYNERGISES - TERPINOL, ETHANOL a 95° < 5% - EXCIPIENTS

CARACTERISTIQUES

*Aspect : Liquide *Odeur : Inodore *Couleur : Incolore	*Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C *pH du produit concentré : $9,6 \pm 0,5$ *pH du produit dilué à 2% : $9,3 \pm 0,5$	*Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés *Peremption : 4 ans
--	---	---

TOXICOLOGIE

* DL 50 : 8,75 ml/Kg < DL50

* Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.

* Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée.

INDICATION

BACTIDYN® ASPIRATION CHIRURGICALE NETTOYANT DESINFECTANT CONCENTRE

s'utilise pour des circuits d'aspiration chirurgicale, pompes à salives, dispositifs médicaux des hopitaux et des cabinets de chirurgie dentaire en particulier.

PROTOCOLE D'UTILISATION

Préparer une solution à 2 % dans de l'eau froide ou tiède. Aspirer cette solution par les embouts flexibles des systèmes d'aspiration. Laisser agir 15 minutes et rincer.

PRECAUTIONS D'EMPLOI (CF. FDS)


Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas avaler.

Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses.

PRÉSENTATION

Références : BL Aspi bidon de 5 litres

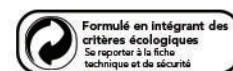

Fabricant Exploitant et distribution : **PHI (PRODHYG IND)**

TEL: 98 314 510 - FAX: 70 691 123 / 70 727 452

✉ prodhyg@yahoo.fr 🌐 www.prodhyg.net