



BACTIDYN®DDSH

DÉTERGENT DESINFECTANT SURFACE HAUTE

SURFACES

spray prêt à l'emploi destiné au nettoyage est à la désinfection par contact du matériel médical, des équipements, et de toutes les surfaces, dispositifs médicaux non invasifs, particulièrement adapté pour les surfaces hautes (murs, scialytiques...)

ACTIVITES

BACTERICIDE conforme normes européennes NF EN 1040, EN 13727, NF EN 1276 conditions de saleté et normes AFNOR NF T 72-151 spectre 5 et NF T 72-190. EN 14561. **LEVURICIDE** EN 1362, EN 14562. **SPORICIDE** EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté – 5% – 60 min – 20°C). **FONGICIDE** conforme aux normes européennes NF EN 1275. **VIRUCIDE** Rotavirus, Poliovirus, Adenovirus, Herpes virus, HIV-1 (inactivation en 5 minutes M.A. WAINBERG, 1990) selon la méthodologie de la norme AFNOR NF T 72-180. EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, (conditions de saleté – 2% – 5 min – 20°C) Herpes, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), Norovirus (conditions de saleté – 2% – 15 min – 20°C), HIV (conditions de saleté – 2% – 60 sec – 20°C) * Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV.

COMPOSITION

PEROXYDES - AMMONIUM QUATERNAIRES SYNERGISES - TERPINOL, ETHANOL a

CARACTERISTIQUES

*Aspect : Liquide *Odeur : inodore *Couleur : Incolore	*Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C	*Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés
*pH du produit prêt à l'emploi : 9,8 ± 0,5	*pH du produit concentré : 9,7 ± 0,5 *pH du produit dilué à 2% : 8,8 ± 0,5	*Peremption : > 4 ans

TOXICOLOGIE

- *Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.
- *Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée.

INDICATION

BACTIDYN DDSH S'utilise pour le nettoyage et la désinfection

- du matériel médical et utilise en attente de nettoyage
- de toutes surfaces, des plans de travail, des paillasse
- du petit mobilier, des fauteuils
- de l'unité dentaire
- des tables d'examen...

* ne remplace pas une désinfection par trempage.

PROTOCOLE D'UTILISATION

- Pulvériser uniformément sur les surfaces à désinfecter
- Essuyer si nécessaire ou laisser sécher, ne pas rincer

PRECAUTIONS D'EMPLOI (CF. FDS)

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas avaler


Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses.

PRÉSENTATION

Références : BL DDSH (Flacon Pulvérisateur de 500 ml)
(Flacon Pulvérisateur de 750 ml)



Formulation douce
Protégeons notre environnement
Produit réservé à usage professionnel

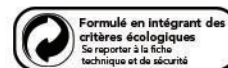

Formulé en intégrant des
critères écologiques
Se reporter à la fiche
technique et de sécurité



Fabricant Exploitant et distribution : **PHI (PRODHYG IND)**

TEL: 98 314 510 - FAX: 70 691 123 / 70 727 452

✉ prodhyg@yahoo.fr 🌐 www.prodhyg.net