



BACTIDYN® PE INODORE

DÉSINFECTANT SPÉCIAL COUCHEUSE PRÊT A L'EMPLOI INODORE



BACTIDYN PRÊT A L'EMPLOI INODORE est utilisé pour le nettoyage et la désinfection par contact des équipements, matériels et de l'instrumentation, dispositifs médicaux non invasifs.

BACTIDYN PRÊT A L'EMPLOI INODORE s'utilise en particulier dans les services de néonatalogie pour les couveuses et surfaces sensibles.

ACTIVITES

BACTERICIDE : conforme normes européennes NF EN 1040, EN 13727, NF EN 1276 conditions de saleté et normes AFNOR NF T 72-151 spectre 5 et NF T 72-190. EN 14561.

LEVURICIDE : EN 13624, EN 14562. **SPORICIDE** : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté — 5% — 60 min — 20°C)

SPORICIDE : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté — 5% — 60 min — 20°C) **FONGICIDE** : conforme aux normes européennes NF EN 1275.

VIRUCIDE : Rotavirus, Poliovirus, Adenovirus, Herpes virus, HIV-1 (inactivation en 5 minutes M.A. WAINBERG, 1990) selon la méthodologie de la norme AFNOR NF T 72-180. EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, (conditions de saleté — 2% — 5 min — 20°C) Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté — 0.5% — 5 min — 20°C), Norovirus (conditions de saleté — 2% — 15 min — 20°C), HIV (conditions de saleté — 2% — 60 sec — 20°C) * Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV.

COMPOSITION

PEROXYDES STABILISÉS-AMMONIUMS QUATÉNAIRES SYNERGISÉS-ETHANOL à 95% < 5%-EXCIPIENTS

CARACTERISTIQUES

*Aspect : Liquide *Odeur : Inodore *Couleur : Incolore	*Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C	*Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés
*pH du produit prêt à l'emploi : 9,6±0,5		*Peremption : > 4 ans

TOXICOLOGIE

* DL 50 : 85 ml/kg < DL 50 < 90 ml/kg

* Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.

* Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

INDICATION

BACTIDYN PRÊT A L'EMPLOI INODORE s'utilise pour le nettoyage et la désinfection des couveuses, isolateurs, bulles stériles...

PROTOCOLE D'UTILISATION

BACTIDYN PRÊT A L'EMPLOI INODORE s'utilise par application du produit avec des chiffons (l'état stérile du chiffon peut être requis pour certaines situations).

séchage à l'air libre ou par essuyage avec des chiffons (l'état stérile du chiffon peut être requis pour certaines situations) Le rinçage n'est pas justifié si le séchage est minutieux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI (CF. FDS)

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas avaler.

Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses.

Ne pas vaporiser près d'une flamme ou d'une source de chaleur ou électrique.

PRÉSENTATION


Références : Bidon de 5 litres

Flacon Pulvérisateur de 1 litre

Flacon Pulvérisateur de 750 ml



Formulation douce
Protégeons notre environnement
Produit réservé à usage professionnel

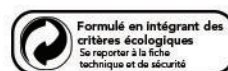

Fabricant Exploitant et distribution : **PHI (PRODHYG IND)**

TEL: 98 314 510 - FAX: 70 691 123 / 70 727 452

✉ prodhyg@yahoo.fr 🌐 www.prodhyg.net